



## Autoridad Portuaria Santa Cruz de Tenerife

Edificio Junta del Puerto. Avda. Francisco La Roche nº49. 38001. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España  
+34 922 605 400 / puertosdetenerife.org

### USO DE GUANTES

**Los guantes pueden estar fabricados de distintos materiales. Látex natural, vinilo, nitrilo y neopreno.**

Por otro lado, los no estériles (látex, vinilo y nitrilo) se usan para evitar contacto físico con secreciones, fluidos, piel, mucosas y materiales sucios o contaminados en maniobras y procedimientos de riesgos.

### RECOMENDACIONES PARA USO CORRECTO

Por un lado, la talla debe ser la correcta, ya que el uso de unos guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación.

También **hay que lavarse las manos antes y después de usarlos**, y proteger cualquier herida con un apósito impermeable antes de ponérselos.

Se aconseja no llevar relojes, pulsera o anillo ya que pueden romper los guantes.

En caso de rotura, deterioro o contacto con el contaminante, se recomienda cambiar el guante.

### RECOMENDACIONES PARA QUITAR EL GUANTE

Desechar los guantes en papeleras habilitadas con tapas de apertura y cierre. **Seguir las indicaciones que aparecen en la página siguiente:**





**Autoridad Portuaria  
Santa Cruz de Tenerife**

Edificio Junta del Puerto. Avda. Francisco La Roche nº49. 38001. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España  
+34 922 605 400 / puertosdetenerife.org

**Es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible contaminación del elemento hacia el trabajador, a continuación se indica la técnica de como quitarlos:**



**Pellizcar por el exterior del primer guante**



**Retirar sin tocar la parte interior del guante**



**Retirar el guante en su totalidad**



**Recoger el primer guante con la otra mano**



**Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el interior**



**Retirar el guante sin tocar la parte externa del mismo**



**Retirar los dos guantes en el contenedor adecuado**